

ImPath HEMATOXYLIN WITH DAB ENHANCER



Disponibilidade do Produto

N.º Ref. 45000
Quantidade 100 Testes

Utilização Prevista

Para Uso Diagnóstico In Vitro.

Descrição

A ImPath Hematoxylin with DAB Enhancer (hematoxilina com intensificador de DAB (diaminobenzidina)) destina-se a ser utilizada na imunohistoquímica, juntamente com o ImPath 36. A hematoxilina marca os núcleos das células e tem muitas aplicações em histologia. Em procedimentos de imunohistoquímica (IHQ), a hematoxilina pode ser utilizada como contracoloração (coloração de contraste) para ajudar na visualização e localização do produto final colorido do procedimento de IHQ.

Este produto é utilizado em procedimentos de imunohistoquímica (IHQ) que permitem a identificação qualitativa de antigénios, por microscopia óptica, em secções de tecido fixadas com formol e embebidas em parafina, através de etapas sequenciais intercaladas com etapas de lavagem. A Hematoxilina ImPath com Intensificador de DAB é aplicada às secções após a reacção do substrato/cromogénio. Marca os núcleos com uma coloração vermelha, que é convertida em azul através da lavagem das secções em água ou numa solução alcalina fraca (reagente de azulamento). O Intensificador de DAB na solução irá transformar a cor azul na cor escura.


Resumo e Explicação

A IHQ (Imunohistoquímica) é uma técnica normalmente utilizada para a identificação de antigénios presentes em tecidos ou células.

Cabe ao operador identificar as melhores condições de trabalho e os melhores reagentes para realizar a marcação.

Reagentes Fornecidos

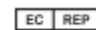
Componente	Quantidade por kit
Hematoxilina com Intensificador de DAB	1 (um)

 PathCom Systems, Inc.
6759 Sierra Ct. Ste# B
Dublin, CA 94568

Rev: 090514B

Distribuído por:

A.Menarini Diagnostics S.r.l.
Via Sette Santi, 3
50131 Firenze
Italy

 A.M. Bertolini
Via Gorizia 50
23900 Lecco
Italy



ImPath HEMATOXYLIN WITH DAB ENHANCER



Diluição e Mistura

O produto está pronto a utilizar. Não é necessário fazer nenhuma diluição adicional.

Armazenamento e Estabilidade

Armazenar a uma temperatura de 2-8°C. Não congelar. Os reagentes devem ser repostos nas condições de armazenamento acima identificadas imediatamente após a sua utilização. Quando devidamente armazenados, os reagentes permanecem estáveis até à data indicada no rótulo.

Advertências e Precauções:

As Soluções ImPath são nocivas e irritantes para os olhos, vias respiratórias e pele. Se ingeridas, podem causar lesões nos pulmões e no estômago. **Usar luvas descartáveis quando manusear reagentes.** As MSDS estão disponíveis mediante pedido junto do seu representante local. Não existem quaisquer garantias expressas ou implícitas para além das presentes nesta ficha de dados. A ImPath não assume qualquer responsabilidade por lesões pessoais, danos materiais ou prejuízos económicos causados por este produto.

Instruções de Utilização

Reagentes para procedimentos de IHQ

Diluir o tampão de lavagem (20x), misturando 19 partes de água destilada com 1 parte de tampão de lavagem para obter a concentração final de 1x. Encher a garrafa de tampão de lavagem do instrumento com o tampão de lavagem (1x) e enroscar a tampa ligada à tubagem. Colocar a garrafa na área destinada ao efeito no instrumento.

Retirar do frigorífico a Prateleira de Reagentes que contém os frascos de solução necessários rotulados por RFID, remover as tampas dos frascos e colocar a Prateleira de Reagentes no ImPath 36. Ligar a unidade, iniciar sessão, premir **Preparar Etiquetas** para preparar as etiquetas e depois colocá-las nas lâminas. Premir **Carregar Lâminas**, colocar as lâminas nos módulos e premir **Digitalizar Lâminas**. Depois, premir **Digitalizar Reagentes** e deixar que o Leitor de RFID identifique e registe os produtos. Verificar o tampão de lavagem e contentor de resíduos necessários e premir **Iniciar Processo de Marcação**, ou premir **Adiar Início** e definir a hora de conclusão desejada, ou clicar em **Voltar ao Ecrã Principal** e clicar em **Iniciar**. O processo de marcação é totalmente automático.